

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DELLA SEDIA A ROTELLE PER STERRATO

Gentile ospite,

la ringraziamo per aver scelto di trascorrere del tempo libero al Monte Tamaro e siamo felici che possa farlo con meno barriere grazie all'utilizzo della sedia Mountain Drive.

Le chiediamo gentilmente di leggere quanto segue:

- La invitiamo a regolare la sedia in base alle sue esigenze, non esiti a chiedere aiuto al nostro personale in caso di bisogno.
- È obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza.
- La sedia va manovrata tramite il Joystick. Utilizzarlo è semplice:
 - Joystick in avanti, la sedia si sposta in avanti
 - Joystick indietro, procedete in retromarcia
 - Joystick a destra o sinistra: segue il senso di manovra
- Per frenare basta lasciare il Joystick. La sedia frenerà automaticamente.
- È importante guidare unicamente sui i sentieri indicati dalla Monte Tamaro SA nell'apposita cartina e pubblicata sul sito www.montetamaro.ch
- Numero d'emergenza: 0041 (0) 91 946 23 03.
- Assicuratevi di avere il telefono carico.

Si prega di notare che l'uso della sedia a rotelle Mountain Drive è a proprio rischio e pericolo, la Monte Tamaro SA non si assume alcuna responsabilità.

CONDIZIONI D'UTILIZZO



Nome:

Cognome:

Data:


Confermo di aver preso atto della guida rapida e di aver letto ed accettato le informazioni sopraelencate e le condizioni d'utilizzo.

Firma:

.....

Vi auguriamo una splendida giornata,
Team Monte Tamaro

Monte
TAMARO

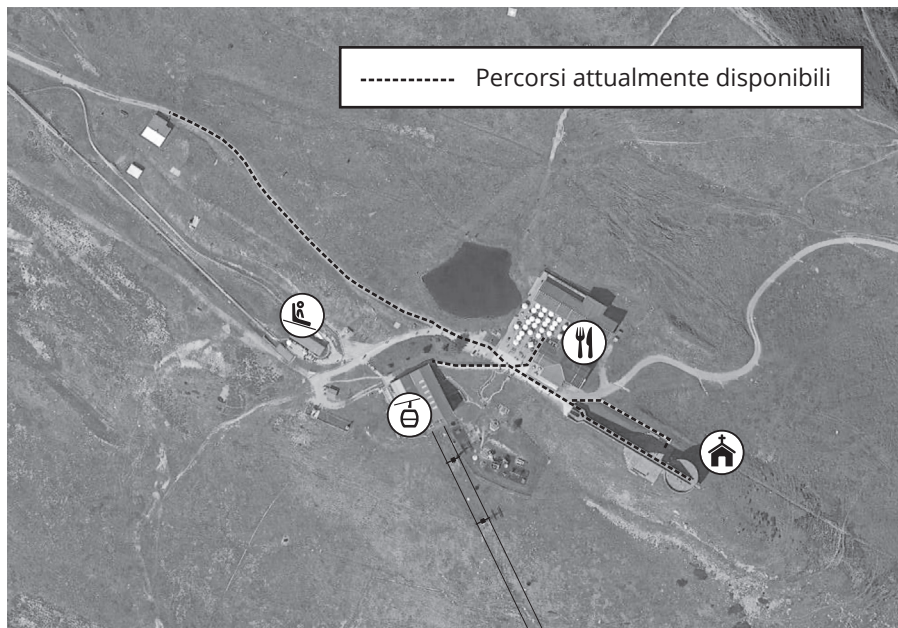

CONDIZIONI D'UTILIZZO

1. La sedia a rotelle JST Multidrive va ritirata e riconsegnata alla stazione d'arrivo della telecabina all'Alpe Foppa.
2. L'utilizzo della sedia a rotelle è esclusivamente destinato alla persona che l'ha noleggiata e ai suoi accompagnatori.
3. La JST Multidrive può essere utilizzata esclusivamente sui percorsi indicati sul sito www.montetamaro.ch/cerebral e sull'apposita cartina.
4. Si può pilotare la sedia a rotelle autonomamente, ma è anche possibile che venga pilotata da qualcun altro.
5. Il peso massimo per utilizzare la sedia è di 100kg.
6. La Monte Tamaro SA s'impegna a consegnare una sedia funzionante e con una batteria carica.
7. Eventuali danni o guasti saranno da segnalare al momento della riconsegna. Danni o guasti dovuti ad un mal utilizzo della sedia a rotelle sono a carico del cliente.
8. Per poter utilizzare la JST Multidrive il cliente deve aver sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile.
9. Valgono inoltre le condizioni generali della Monte Tamaro SA consultabili sul sito www.montetamaro.ch/cga.