

KURZANLEITUNG ZUR NUTZUNG DES GELÄNDEGÄNGIGEN ELEKTOROLLSTUHLS

Lieber Gast,

herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns auf dem Monte Tamaro. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu dem JST Mountain Drive genau durch.

- Stellen Sie den Mountain Drive passend zu Ihren Bedürfnissen ein, Bei Fragen steht Ihnen unser Personal gerne zur Verfügung.
- Bleiben Sie immer angeschnallt.
- Der Mountain Drive wird mit einem Joystick bedient. Es geht ganz einfach:
 - Joystick nach vorne, der Stuhl fährt vorwärts
 - Joystick nach hinten, der Stuhl fährt rückwärts
 - Joystick nach links oder rechts: Steuerung
- Bremsen: lassen Sie den Joystick los, der Mountain Drive stoppt automatisch.
- Es ist wichtig, dass der Mountain Drive nur auf den von der Monte Tamaro SA vorgegebenen Wegen gefahren wird. Diese sind auf der entsprechenden Karte eingezeichnet und auf www.montetamaro.ch ersichtlich.
- Notfallnummer: 0041 (0) 91 946 23 03.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon aufgeladen ist.

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Mountain Drive auf eigene Gefahr erfolgt. Die Monte Tamaro SA übernimmt keine Haftung.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN ►

Vorname:

Name:

Datum:


Ich bestätige hiermit, dass ich die Kurzanleitung zur Kenntnis genommen habe und die oben genannten Informationen sowie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert habe.

Unterschrift:

.....

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt,
Team Monte Tamaro

Monte
TAMARO

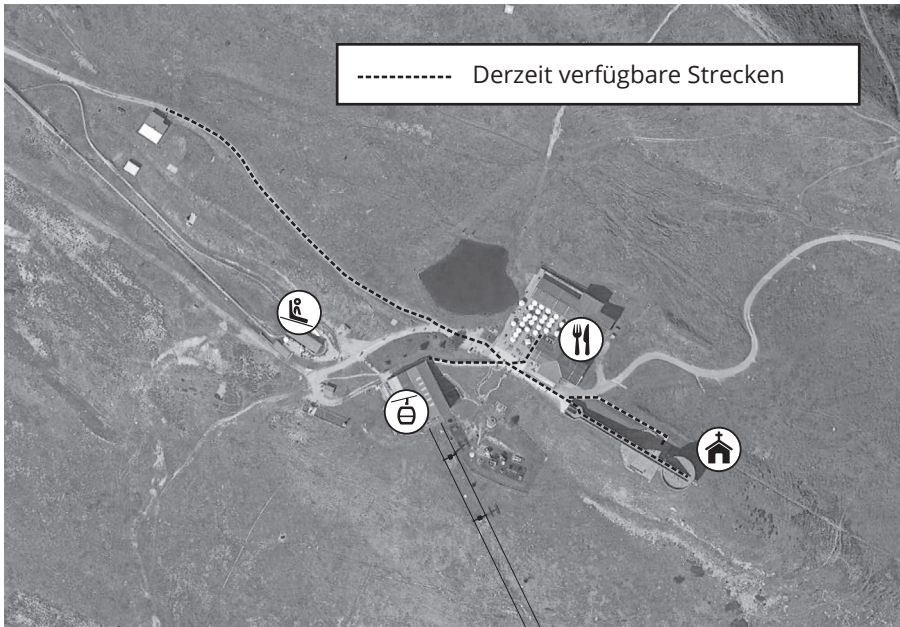

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Der JST Multidrive Rollstuhl muss an der Bergstation der Seilbahn auf der Alpe Foppa abgeholt und zurückgebracht werden.
2. Die Nutzung des Rollstuhls ist ausschliesslich der Person, die ihn gemietet hat, und ihren Begleitern vorbehalten.
3. Der JST Multidrive darf nur auf den auf www.montetamaro.ch/cerebral und auf der Karte angegebenen Strecken verwendet werden.
4. Sie können den Rollstuhl selbst steuern. Dank einer entsprechenden Steuereinheit ist es auch zudem möglich, dass eine Begleitperson den Rollstuhl steuert.
5. Das maximale Gewicht für die Verwendung des Stuhls beträgt 100 kg.
6. Die Monte Tamaro SA verpflichtet sich, einen funktionsfähigen Stuhl mit geladenem Akku bereitzustellen.
7. Etwaige Schäden oder Mängel sind bei der Rückgabe zu melden. Schäden oder Mängel, die auf eine unsachgemässe Verwendung des Rollstuhls zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Kunden.
8. Um den JST Multidrive benutzen zu können, muss der Kunde eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
9. Es gelten nebst diesen Nutzungsbedingungen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Monte Tamaro SA, die unter www.montetamaro.ch/agb eingesehen werden können.